



8 (800) 333-05-35

www.tepleko.ru

Поздравляем Вас с приобретением бактерицидного рециркулятора воздуха «ТеплЭко» !

Данное руководство для пользователя содержит важную информацию по установке и использованию бактерицидного рециркулятора «ТеплЭко». Найдите время, чтобы прочитать это руководство, так как оно поможет Вам в полной мере использовать все возможности Вашего рециркулятора в течение многих лет.

НАЗНАЧЕНИЕ БАКТЕРИЦИДНОГО РЕЦИРКУЛЯТОРА «ТЕПЛЭКО» И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бактерицидный рециркулятор от компании «ТеплЭко» предназначен для обеззараживания воздуха УФ излучением в присутствии людей. Обеззараживание воздушного потока происходит в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены источники бактерицидного облучения. В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные лампы. Рециркулятор закрытого типа может эксплуатироваться в присутствии людей, животных и растений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна изготовитель	Россия
Производительность	20 м³/час
Мощность ультрафиолетовой лампы	10, Вт
Суммарный бактерицидный поток	2.4
Электрическая мощность	10, Вт
Напряжение питания сети	220±10 % В
Частота	50, Гц
Потребляемый ток	0,06, А
Класс электробезопасности по ГОСТ Р 50267.0	I класс
Тип лампы	ДКБУ - 11
Уровень шума не более	24, дБ
Габаритные размеры без упаковки	350х100х100, мм
Масса	1,5 кг
Срок службы лампы	8000, ч

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Бактерицидный рециркулятор воздуха «ТеплЭко» 1 ШТ.
Паспорт изделия 1 ШТ.
Силовой провод 1,5 м.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Бактерицидные рециркуляторы воздуха «ТеплЭко» спроектированы и изготовлены в соответствии с требованиями и нормативами по безопасности. Необходимо внимательно прочитать настоящее предупреждение, составленное в целях Вашей безопасности.

- ! Перед подготовкой рециркулятора к работе внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
- ! Прямое УФ-излучение вредно воздействует на кожу и слизистые, поэтому при возникновении любой неисправности, при которой прямое УФ-излучение проникает наружу корпуса, рециркулятор подлежит ремонту.
- ! Любой ремонт электроприбора должен производить только квалифицированный персонал. Использование устройства после неправильного ремонта может стать небезопасным для его пользователя.
- ! Все работы, связанные с проверкой работоспособности ламп, требующие включения устройства, должны проводиться с использованием средств индивидуальной защиты органов зрения и кожи (перчатки, халат, очки и другие СИЗ).
- ! Не оставляйте детей без присмотра вблизи работающего прибора.
- ! Лицам, незнакомым с руководством по эксплуатации, а также детям, запрещается использование прибора.
- ! Никогда не пользуйтесь прибором, если повреждены сетевой кабель или вилка, если Вы уронили устройство или повредили его каким-либо образом.
- ! Выполнение работ по уходу за прибором необходимо проводить только при выключенной из розетки вилке.
- ! Не прикасайтесь к изделию влажными руками или во влажной одежде.
- ! Категорически запрещается использование устройства в помещениях с горючими жидкостями и их парами, а также в запыленных пространствах.
- ! УФ-лампа содержит ртуть, поэтому изделие подлежит утилизации по соответствующим правилам.

УСТРОЙСТВО БАКТЕРИЦИДНОГО РЕЦИРКУЛЯТОРА «ТЕПЛЭКО»


Внутри корпуса бактерицидного рециркулятора «ТеплЭко» установлен вентилятор и безозоновые бактерицидные лампы. Материал корпуса устройства - углеродистая сталь. Источник излучения – бактерицидные безозоновые ультрафиолетовые лампы мощностью 10Вт типа ДКБУ – 11. На боковой части корпуса расположена кнопка включения/отключения. Ультрафиолетовые лампы расположены в отдельном отсеке, тем самым, исключено попадание УФ-излучения на блок питания и прочие электронные компоненты. Вентилятор установлен на силиконовые гвозди, которые гасят вибрацию. При работе прибора, особенно первое время, возможно появление специфического запаха. Данный запах не является признаком неисправности.

Примечание: в связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии производства, в Вашем экземпляре рециркулятора воздуха могут быть изменения, не отмеченные в настоящем паспорте и не ухудшающие параметры его работы.

ПОЛОЖЕНИЕ КНОПКИ

I - включено (вверх)

O - выключено (вниз)

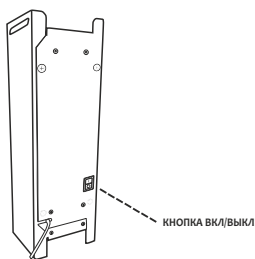

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА БАКТЕРИЦИДНОГО РЕЦИРКУЛЯТОРА

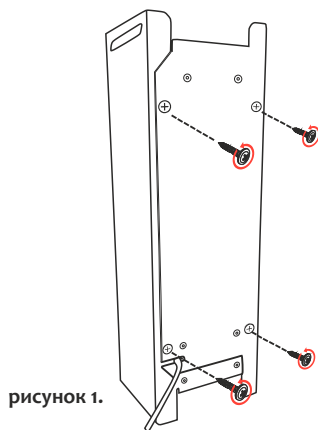


рисунок 1.

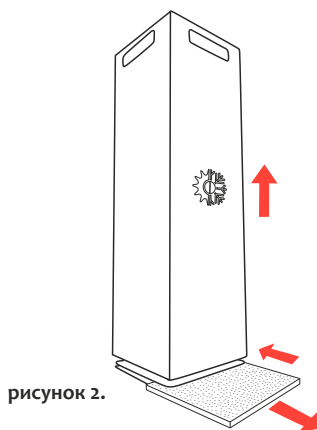


рисунок 2.

Для замены фильтра необходимо:

1. Выкрутить 4 самореза на задней части рециркулятора, как указано на рисунке 1.
2. Выдвинуть основную часть корпуса рециркулятора и извлечь использованный фильтр, заменить новым сменным фильтром, как указано на рисунке 2.
3. Собрать рециркулятор в обратном порядке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

Фирма ООО «ТД ТеплЭко» гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами оборудования при соблюдении правил его эксплуатации. На бактерицидный рециркулятор предоставляется гарантия 12 (двенадцать) месяцев со дня его продажи.

Условия гарантии:

Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей. Гарантия не включает периодическое обслуживание. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими в результате:

- механических повреждений;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильного монтажа, транспортировки, хранения;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнений и т.п.);
- причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от государственных технических стандартов питающих сетей.

Изготовитель: ООО «ТД ТеплЭко»

ПОДГОТОВКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ К РАБОТЕ

Рециркулятор предназначен для работы в условиях:

- Температура окружающего воздуха, от +10°C до +35°C
- Относительная влажность до 80% (при t +25 °C)
- Давление, от 630 до 800 мм рт.ст.

Извлеките прибор из упаковки. Убедитесь в отсутствии механических повреждений. После хранения рециркулятора в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях, его можно включить в сеть не раньше, чем через 2 часа пребывания при комнатной температуре. В присутствии людей рециркулятор может работать непрерывно в течение всего времени, необходимого для обеззараживания воздуха УФ излучением. Интервалы между включениями не регламентированы.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Принцип работы

Вентилятор втягивает поток воздуха, который поступает внутрь рециркулятора, проходя нижнюю вентиляционную решетку и экранирующую перегородку. Далее воздух, облучаясь лампами, обеззараживается и выбрасывается наружу через верхнюю вентиляционную решетку с направленными ламелями.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Общие указания

Соблюдайте рекомендации и правила работы с прибором. Рекомендуем придерживаться указаний данного руководства.

Таблица неисправности

Наименование неисправности, внешние признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Устройство не работает – не слышна работа вентилятора.	Нет напряжения в линии питания 220В.	Проверить напряжение в линии питания.
Не горит одна из 2-ух ламп – отсутствие слабого УФ излучения под решеткой Прибора.	Вышла из строя лампа.	Обратиться в сервисный центр.

Система добровольной сертификации «Испытательный научно-технический центр сертификации, стандартизации ЕАЭС и международных услуг»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер РОСС RU.32396.04НТЦ0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32396.04НТЦ0.0С02.01007

Срок действия с 28.02.2022

по 27.02.2025

№ 0001327

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.32396.04НТЦ0.0С02

Общество с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения: 127460, г. Москва, ул. Мусоргского, дом 11, телефон: 8 (4812) 63-39-09, электронная почта: fss-info1@mail.ru. Аттестат аккредитации № 04НТЦ0.0С02, выдан 13.04.2021 года

ПРОДУКЦИЯ

Бактерицидный рециркулятор воздуха, ультрафиолетовый т.м. «ТеплЭко». Серийный выпуск.

код ОК

28.25.14

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 28.25.14-003-94589602-2021

код ТН ВЭД

842139200

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТД ТеплЭко». Место нахождения: 192029, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, набережная Перевозная, д. 13, литер И, помещение часть 1-Н, комн. №14. ОГРН: 1157847014456, ИНН: 7801270731, телефон: 8-812-933-12-76, электронная почта: mail@tepko.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ТД ТеплЭко». Место нахождения: 192029, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, набережная Перевозная, д. 13, литер И, помещение часть 1-Н, комн. №14. ОГРН: 1157847014456, ИНН: 7801270731, телефон: 8-812-933-12-76, электронная почта: mail@tepko.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0299-ФОВ/22 от 28.02.2022, выданного ИЛ ООО «МОСТЕХНОКОМ» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32396.04НТЦ0.ИЛ06)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Руководитель органа

Эксперт

(Signature)
подпись
(Signature)
подпись

Машин Вадим Николаевич
инженер, фактотип

Григорьев Александр Степанович
инженер, фактотип

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества!

Благодарим Вас за Ваш выбор и гарантируем высокое качество и надёжность купленного Вами изделия при условии соблюдения правил, указанных в инструкции по эксплуатации.

Изделие, которое Вы купили:

- имеет сертификат РОСТЕСТа;
- соответствует международному стандарту качества ISO 9001;
- соответствует европейским и российским требованиям безопасности;
- класс электробезопасности по ГОСТ Р 50267,0 I класс
- имеет класс влагозащиты IP20, согласно «Правилам устройства и эксплуатации электроустановок» (ПУЭ).

При отсутствии даты продажи и штампа магазина в паспорте изделия, срок гарантии исчисляется с даты продажи на товарном, кассовом чеке или товарно-транспортной накладной.

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в уполномоченные сервисные центры.

Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на сайте www.tepleko.ru

Дополнительную информацию об этом и других изделиях Вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии: 8-800-333-05-35

E-mail: mail@tepleko.ru

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Продавец _____ Штамп Продавца

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до начала установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его Инструкцию по эксплуатации.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и печать Продавца.

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в уполномоченном сервисном центре.

Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня принятия неисправного изделия уполномоченным сервисным центром.

Гарантийный срок на новые комплектующие изделия, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия не распространяется на:

- любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:

- использования изделия не по прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, импортером, уполномоченной изготовителем организацией, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений чрезвычайной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из вышеперечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации изделия неуполномоченными на то организациями/лицами;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других обстоятельств, находящихся вне контроля Продавца, импортера, уполномоченной изготовителем организации, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия в электросеть, неисправности электросети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей,
- неправильного хранения изделия;
- в случае отсутствия гарантийного талона и платежного документа.

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п. 11 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. правительства РФ от 19.01.1998 № 55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке, предусмотренном ст 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства могут быть допущены опечатки.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме в соответствии со ст. 10 Закона “О защите прав потребителей”;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке;
- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
- Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/_____ купленного изделия не имеет.

если изделие проверялось в присутствии
Покупателя написать «работе»

Покупатель:

Подпись:

Дата:

ТеплЭко® является зарегистрированной
торговой маркой, принадлежащей
компания ООО «ТД ТеплЭко»

ООО «ТД ТеплЭко»
199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская д.13
+7 (812) 309-96-18, +7 (800) 333-05-35, mail@tepleko.ru
www.tepleko.ru




РосКедр - производитель кедровых бочек с 2003 года

Кедровая мини-парная Роскедр - это компактная, удобная и доступная альтернатива обычной бане, которая может быть установлена в квартире, загородном доме и других помещениях. Фитобочка герметична, занимает не более 1 м², потребляет менее 2 кВт/ч.

 roskedr.ru 8 800 555 27 07



ДЛЯ ЗАМЕТОК

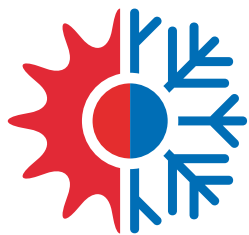

ТЕПЛАКО


завод энергоэффективных
обогревателей **основан в 2010 году**

Паспорт изделия

**Бактерицидный
рециркулятор воздуха**

**для квартиры, загородного дома, офиса
и любых других помещений**

ЕАС СЕ
сертификаты
внутри

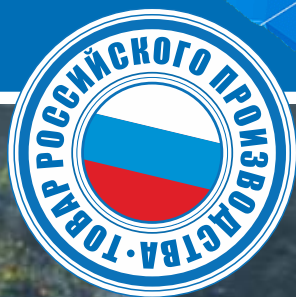

8 (800) 333-05-35

www.tepleko.ru